

Harvard UltraFill

Ultra Gloss, Opalescent, High Performance

Composite für anteriore und posteriore Restaurationen.



Pure Ästhetik im neuen Glanz.

1. Multi Opacity Schichttechnik für Spezialisten

Perfekte ästhetische Ergebnisse mit Harvard UltraFill Multi Opacity. Mit diesem opalisierenden Hochleistungscomposite lassen sich alle anspruchsvollen Restaurationen lösen. Dieses Konzept bietet eine große Vielfalt an Vita®- und Spezialfarben.

(Schichtungen von Dentin und Schmelz, Incisal und weiteren transluzenten Farben).



Multi Opacity Schichttechnik für Spezialisten



Dentin Opacity



Enamel Opacity



Transpa Opacity



Einfach und effizient.

2. Universal Opacity

Einfaches schichten mit Harvard UltraFill Universal, tolle Hochglanzergebnisse bei geringem Zeiteinsatz.

(Einfache Technik – eine mittlere Opazität).


2

verschiedene Opazitäts-konzepte




Universal Opacity

oder

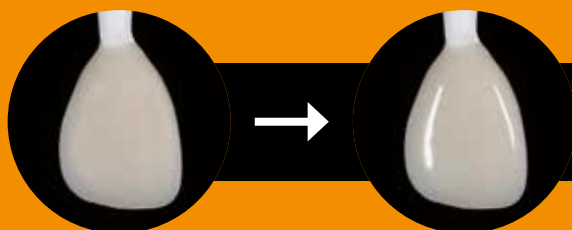


Universal Opacity

Intuitive Farbkennzeichnung.

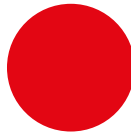

Dentin Opacity

Dentin Farben für die Multi Opacity Schichttechnik.

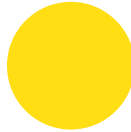


Enamel Opacity

Enamel Farben für die Multi Opacity Schichttechnik.



Transpa Opacity

Incisial INC oder andere transluzente Farben
T oder TX für die Multi Opacity Schichttechnik.

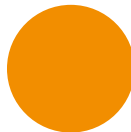

Universal Opacity

Farben mit einer mittleren Opazität,
für einfaches Schichten.

Ein neues Hochleistungs-Composite mit herausragenden Eigenschaften

- Überraszendes Handling
- Leicht zu verarbeiten
- Einfache Polierbarkeit – dauerhafter Hochglanz
- Opaleszenz, zahnähnliche Fluoreszenz, Chamäleon Effekt
- Sehr gute Röntgenopazität
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Optimale physikalische Eigenschaften
- Anorganische Füller kleiner als $0,2 \mu\text{m}$
- **Erhältlich in der neuen 3 g Spritze und in OptiTips®**



2

verschiedene
Opazitäts-
konzepte

Das Harvard UltraFill Opazitätenkonzept im Überblick.



Schöner Hochglanz. Auch nach Monaten.



Perfekte ästhetische Ergebnisse mit der Multi Opacity Schichttechnik.

Schließen eines Diastemas, ZA Andreas Kluschke



vorher



nach 6 Monaten



„ Klasse IV Restauration Schneidezahn 11: Für diesen anspruchsvollen Fall habe ich entschieden, Harvard UltraFill zu verwenden. „





1. Ausgangssituation mit Frontzahn Fraktur.
2. Entfernen des alten Composites, Silikonabformung.
3. Palatinal wurde eine Schale anmodelliert als Grundlage für die Restauration.
4. Mamelons wurden mit Dentin Composite aufgearbeitet (90% Opazität – Harvard UltraFill A1 D).
5. Finale Schicht auf die Mamelons mit Schmelzopazität (80% Opazität – Harvard UltraFill A1 E) und einer Inzisalkante aus Harvard UltraFill INC.
6. Nach der anatomischen 3D Korrektur.



Dr. Pawel Paszkiewicz,
Estetique Clinic,
Polanica Stroj, Poland

Perfekter Randschluss vor und nach Belastung im Kausimulator und durch Thermocycling TC

Harvard InterLock/Harvard UltraFill, Prof. Kunzelmann, LM Universität München

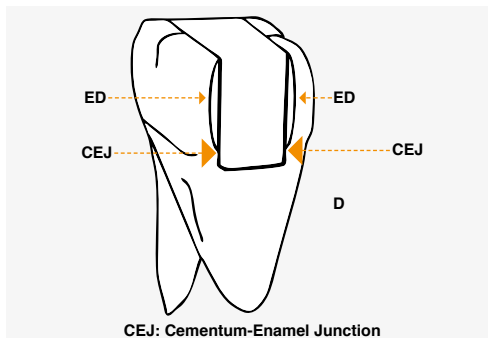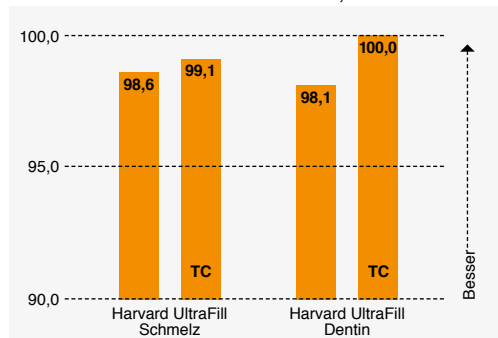

Universal
Opacity

Einfach, schnell und glänzend.

Tolles hochglänzendes Ergebnis mit Harvard UltraFill Universal Opacity.

Klasse V Restauration, ZA Andreas Kluschke



vorher



nach 6 Monaten



Perfekter Randschluss.

Klasse I Restauration, ZA Pawel Paszkiewicz



vorher



nachher



Harvard UltraFill Flow

HARVARD EMPFEHLUNG

Harvard InterLock® ONE
Universal Adhesive







Ultra Gloss, Opalescent, Flowable Composite
für **anteriore** und **posteriore** Restaurationen

- Leichte und dauerhafte Hochglanzpolierbarkeit
- Opaleszenz
- Optimale fließfähige Konsistenz
- Thixotrop
- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Reduzierte Polymerisationsschrumpfung
- Hoher Abrasionswiderstand
- Optimale physikalische Eigenschaften
- Leicht zu verarbeiten
- Chamäleon Effekt

- Erhältlich in ComforTip® F

- Passend für alle Zahnkonditionierungstechniken:
mit oder ohne Ätzelgel, nass oder trocken
- Bequeme und präzise Anwendung durch die
ergonomische Dreiecksflasche mit definierter Tropfengröße

Physikalische Eigenschaften

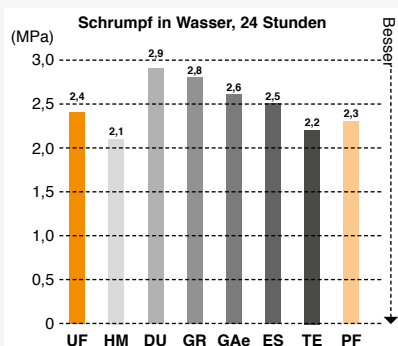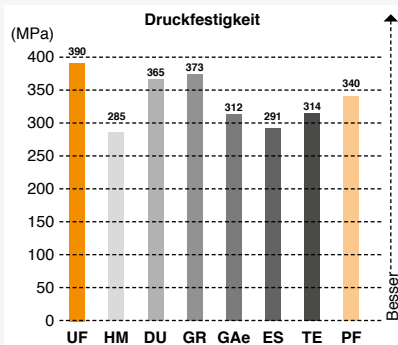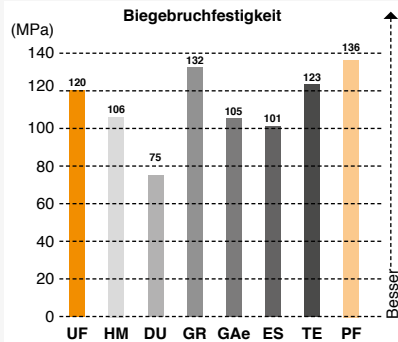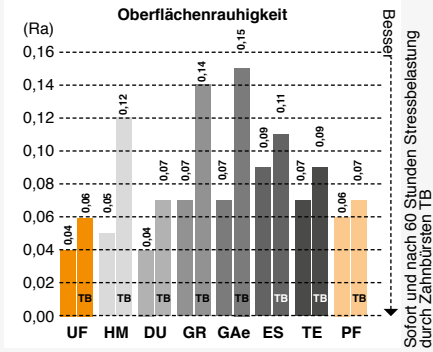

- UF Harvard UltraFill
- HM Heliomolar
- DU Durafill VS
- GR Gradia Anterior
- GAe G-aenial Anterior
- ES Esthet-X HD
- TE Tetric EvoCeram
- PF Harvard PremiumFill



Artikelinformationen

Multi Opacity Refills

	Bestell-Nr. 3 g Spritze	Bestell-Nr. 20 x 0.25 g OptiTips®
Farbe A1 E	7131111	7131211
Farbe A1 D	7121111	7121211
Farbe A2 E	7131112	7131212
Farbe A2 D	7121112	7121212
Farbe A3 E	7131113	7131213
Farbe A3 D	7121113	7121213
Farbe A3.5 E	7131114	7131214
Farbe A3.5 D	7121114	7121214
Farbe B1 E	7131121	
Farbe B1 D	7121121	
Farbe B2 E	7131122	
Farbe B2 D	7121122	
Farbe C2 E	7131132	
Farbe C2 D	7121132	
Farbe A4 E	7131115	
Farbe B3 E	7131123	
Farbe C3 E	7131133	
Farbe INT D	7121140	
Farbe BL E	7131153	
Farbe BL 0.5 (E)	7111150	
Farbe BL D	7121152	
Farbe BL U	7111151	
Farbe INC	7141160	
Farbe T	7141170	
Farbe TX	7141180	

Multi Opacity Kits

Harvard UltraFill „Multi Opacity“ Core Kit 14 Spritzen à 3 g, in den Farben A1 E, A2 E, A3 E, A3.5 E, B1 E, B2 E, C2 E A1 D, A2 D, A3 D, A3.5 D, B1 D, B2 D, C2 D	7186101
Harvard UltraFill „Multi Opacity“ Complementary Kit 10 Spritzen à 3 g, in den Farben A4 E, B3 E, C3 E, BL 0.5 (E), BL E, T, TX, INT D, BL D, INC	7186102
Harvard UltraFill „Multi Opacity“ Trial Kit S 3 Spritzen à 3 g, in den Farben INC, A2 E, A2 D	7176104

Universal Opacity Refills

	Bestell-Nr. 3 g Spritze	Bestell-Nr. 20 x 0.25 g OptiTips®
Farbe A1 U	7111111	7111211
Farbe A2 U	7111112	7111212
Farbe A3 U	7111113	7111213
Farbe A3.5 U	7111114	7111214
Farbe B2 U	7111122	7111222
Farbe C2 U	7111132	7111232
Farbe D3 U	7111143	
Farbe BL U	7111151	

Universal Opacity Kits

Harvard UltraFill „Universal Opacity“ IntroKit S 3 Spritzen à 3 g, in den Farben A2 U, A3 U, A3.5 U	7175100
Harvard UltraFill „Universal Opacity“ IntroKit C 3 x 20 OptiTips® à 0.25 g, in den Farben A2 U, A3 U, A3.5 U	7175200
Harvard Applier OptiTips®	7095200

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de