



Consistenza

Harvard Cement a presa rapida

- consistenza della diluizione:
polvere 1,8 g : liquido 1,0 g

Harvard Cement a presa normale

- consistenza della diluizione:
polvere 1,5 g : liquido 1,0 g

- consistenza per il rivestimento
in cavità:
polvere 2,1 g : liquido 1,0 g

**Si prega di attenersi alle
istruzioni d'uso!**



1. Distribuire su un vetrino pulito ed asciutto ad una temperatura approssimativa di 23 °C.



2. Suddividere in porzioni come segue: 1/2, 1/4, 1/8, 1/8.



3. Miscelazione: iniziare con il primo 1/8 entro 15 sec.



4. Proseguire con il secondo 1/8 entro i successivi 15 sec., miscelare con movimenti a spazzola.



5. Aggiungere 1/4 nella mistura



6. Miscelare esercitando una certa pressione con una spatola piatta entro i successivi 30 sec.



7. Miscelare il rimanente 1/2 entro i successivi 30 sec.



8. Utilizzare l'intera superficie del vetrino.



9. La miscela è pronta per l'uso in 90 sec.