



Consejos para mezclar en Harvard Cement



1

Suggerimento:
utilizzare un piatto di vetro freddo – soprattutto nei paesi caldi.

Distribuire su un vetrino pulito ed asciutto ad una temperatura approssimativa di 23 °C.



2

Suddividere in porzioni come segue: 1/2, 1/4, 1/8, 1/8.



3

Miscelazione: iniziare con il primo 1/8 entro 15 sec.



4

Proseguire con il secondo 1/8 entro i successivi 15 sec., miscelare con movimenti a spazzola.



5

Aggiungere 1/4 nella mistura.



6

Miscelare esercitando una certa pressione con una spatola piatta entro i successivi 30 sec.



7

Miscelare il rimanente 1/2 entro i successivi 30 sec.



8

Utilizzare l'intera superficie del vetrino.



9

La miscela è pronta per l'uso in 90 sec.

Harvard Cement a presa normale:
consistenza della diluizione: polvere 1,5 g : liquido 1,0 g
consistenza per il rivestimento in cavità: polvere 2,1 g : liquido 1,0 g

Harvard Cement a presa rapida:
consistenza della diluizione: polvere 1,8 g : liquido 1,0 g



Si prega di attenersi alle istruzioni d'uso!



Made in Germany