



Mieszanie porad dla Harvard Cement



1

Wskazówka:
Należy używać zimnej płyty szklanej - zwłaszcza w ciepłych krajach.

Wyłożyć materiał na czystą, suchą płytkę szklaną – temp. (23 °C).




2

Podzielić na części: 1/2, 1/4, 1/8, 1/8.



3

Mieszanie : Zacząć mieszanie od pierwszej 1/8 części, przez 15 sek.

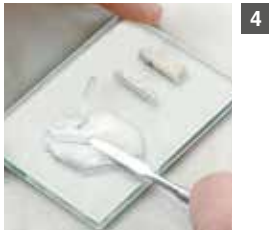

4

Dodać drugą 1/8 część mieszając kolejne 15 sek., wykonując ruchy rozprzodkające.



5

Dodać 1/4 część do rozrobionej mieszaniny.



6

Mieszać naciskając ptaską szpatułką przez kolejne: 30 sek.



7

Rozmieszać pozostała 1/2 materiału w ciągu kolejnych: 30 sek.



8

Należy wykorzystywać całą powierzchnię płytki szklanej.



9

Materiał jest gotowy w ciągu 90 sek.

Harvard Cement normalnie wiążący:
konsystencja do mocowania: proszek 1,5 g : płyn 1,0 g
konsystencja na podkłady w ubytkach: proszek 2,1 g : płyn 1,0 g

Harvard Cement szybko wiążący:
konsystencja do mocowania: proszek 1,8 g : płyn 1,0 g



Proszę zwrócić uwagę na instrukcje użytku!



Made in Germany