



# HARVARD®

## Conselhos de Mistura para Harvard Cement



1

**Dica:**  
Use uma placa de vidro  
fria - especialmente em  
países quentes.

Dispense sobre placa de vidro limpa e seca a aproximadamente 23 °C (73 °F).



2

Divida em porções como segue: 1/2, 1/4, 1/8, 1/8.



3

Espatulação: Comece pela primeira porção de 1/8 dentro de 15 segundos.



4

Adicione a segunda porção de 1/8 nos 15 segundos seguintes; misture com movimentos de espalhar.



5

Incorpore 1/4 na mistura.



6

Misture, comprimindo a espátula, nos próximos 30 segundos.



7

Misture o 1/2 restante nos próximos 30 segundos.



8

Use a superfície inteira da placa de vidro.



9

Mistura pronto para uso em 90 segundos.

**Harvard Cement endurecimento normal:**  
consistência para cimentação: pó 1,5 g : líquido 1,0 g  
consistência para forramento cavitário: pó 2,1 g : líquido 1,0 g

**Harvard Cement endurecimento rápido:**  
consistência para cimentação: pó 1,8 g : líquido 1,0 g



Favor seguir as instruções ao usuário!



Made in Germany

PT