



# HARVARD®

# Harvard LiquiCord®

NEU

**Das Retraktionsmaterial zur temporären Gingiva-Verdrängung.**

Harvard LiquiCord® ist eine Retraktionspaste mit hemostatischem Effekt für die temporäre Gingiva-Verdrängung. Abhängig von der klinischen Situation und der jeweiligen Arbeitsweise kann Harvard LiquiCord® direkt oder mit konventionellen Retraktionsfäden appliziert werden. Gegebenenfalls auch mit Hilfe von Kompressions-Käppchen. Harvard LiquiCord® ist gut verträglich mit Abformmassen.

**Für Zahnärzte:**

- Einfach
- Sicher
- Zeitsparend

**Für Patienten:**

- Gewebeschonend
- Angenehm
- Neutraler Geschmack

Eine Ergänzung oder Alternative zum Faden ...



**Optimales Zubehör:**  
Die Sulcus Former in der passenden Größe



small

medium

large




DE

# So wenden Sie Harvard LiquiCord® an ...

... für detailgetreue Abdrücke ist es wichtig einen sauberen und erweiterten Sulcus vorzufinden. Normalerweise ist der Sulcus nach einer Zahnpräparation gefüllt mit Speichel, Blut und anderen Flüssigkeiten. Sie verhindern, dass das Abdruckmaterial zeichnungscharf in die Regionen fließen kann, die es abbilden soll. Voraussetzung für einen präzisen Abdruck ist die effektive Retraktion mit Harvard LiquiCord®. Es verdrängt temporär die Gingiva und hält den Sulcus trocken und geschützt. Obendrein hat Harvard LiquiCord® einen hemostatischen Effekt.

**Anwendbar für die folgenden Indikationen bei denen die Gingiva temporär verdrängt sein muss:**

- Digitale Abformungen
- Konventionelle Abformungen
- Abformungen von temporärem und definitivem Ersatz
- Restaurationen der Klassen II und V

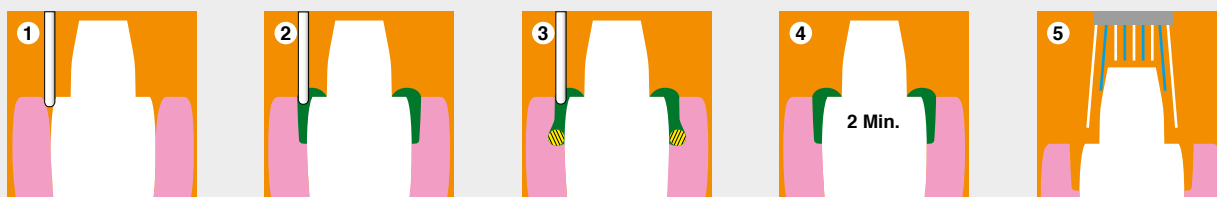

1. Den Needle Tip in den Sulcus einführen und auf diese Weise den Sulcus öffnen.
2. Den Needle Tip im Sulcus langsam und gleichmäßig um den Zahn führen, dabei die Paste ausdrücken und den Sulcus soweit füllen, bis ein Überschuss herausquillt.
3. Falls notwendig kann zur weiteren Sulcusöffnung das Harvard LiquiCord® mit einem Retraktionsfaden kombiniert werden.
4. Harvard LiquiCord® mindestens 2 Minuten im Sulcus einwirken lassen. In diesem Zeitraum jegliche Feuchtigkeit fernhalten.
5. Sofort nach der Einwirkzeit mit einem Luft-Wasser-Gemisch und mit Hilfe einer Absaugung das Harvard LiquiCord® vollständig aus dem Sulcus entfernen.



Artikelinformationen	Bestell-Nr.
<b>Harvard LiquiCord – Spritze</b> 10 x 0.7 g, 20 needle tips	7083870
<b>Harvard Sulcus Former – small</b> Nachfüllbeutel mit 100 Sulcus Former	7083872
<b>Harvard Sulcus Former – medium</b> Nachfüllbeutel mit 100 Sulcus Former	7083873
<b>Harvard Sulcus Former – large</b> Nachfüllbeutel mit 50 Sulcus Former	7083874
<b>Harvard NeedleTips H18 white</b> Nachfüllbeutel mit 50 needle tips	7083875



**HARVARD®**

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH  
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany  
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0  
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19  
info@harvard-dental-international.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.  
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.  
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.