




## Harvard LuteCem SE

**Selbstätzender und adhäsiver,  
dualhärtender, kunststoffverstärkter Befestigungszement**

Mit **Harvard LuteCem SE** ist eine schnelle Verarbeitung möglich – kein Ätzen und Bonden erforderlich. Komfortable Anwendung im Wurzelkanal durch IntraTips. Leichte Entfernung von Überschuss-Material. Zudem verfügt **Harvard LuteCem SE** über eine hohe Fluoridfreisetzung und eine exzellente Farbstabilität.


- Geeignet für zwei Anwendungen:
  1. Befestigung von Wurzelstiften aus Keramik, Metall und faserverstärkten Varianten
  2. Befestigung von Kronen und Brücken aus Keramik, Zirkoniumdioxid, Compositen und Metall
- Dualhärtung
- Fluoridfreisetzung
- Praktisch kein Schrumpf

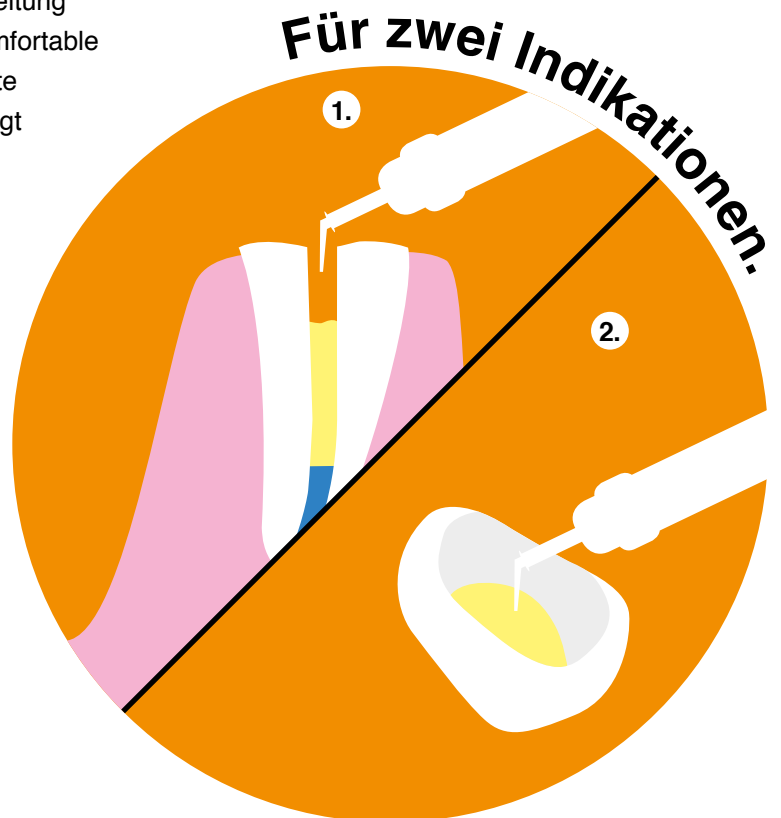


**Einfache  
Anwendung  
und Zeit-  
ersparnis.**




## 1. Wurzelstift-Zementierung

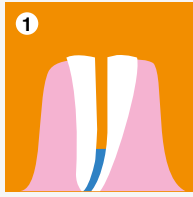

Für die  
Stiftbefestigung  
aufbereiteter  
Wurzelkanal

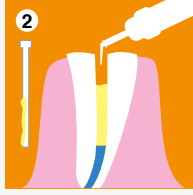

Applikation von  
**Harvard  
LuteCem SE**  
im Kanal und  
am Stift

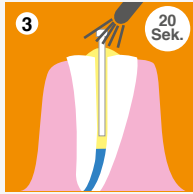

Positionierung des  
Stifts im Kanal  
und Belichtung  
des koronalen  
Bereichs

## 2. Kronen-Zementierung



Applikation in  
der Krone




Krone eingesetzt  
und Kronenrand  
belichtet




Ergebnis:  
Material-  
überschüsse sind  
leicht zu entfernen

## Physikalische Eigenschaften

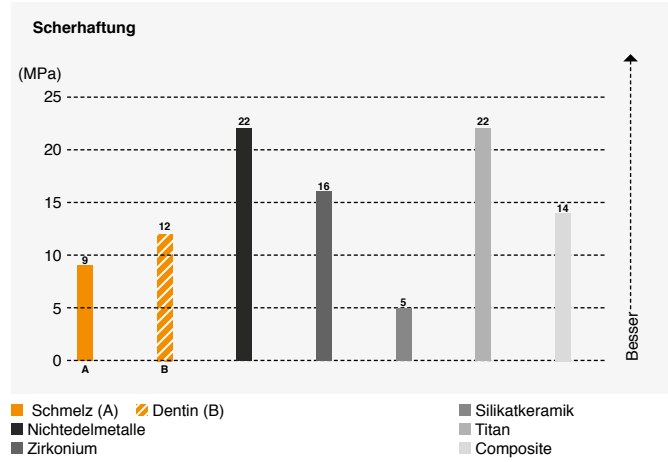

## Kumulierte Fluoridfreisetzung

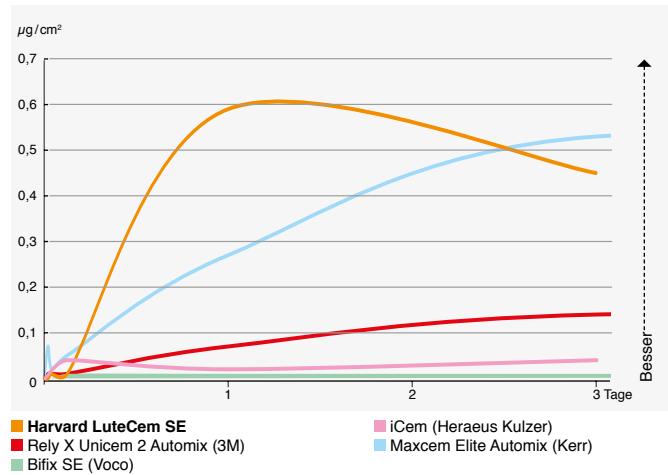

### Technische Daten

Haftkraft auf Schmelz/Dentin	9/12 MPa
Druckfestigkeit	180 MPa
Abbindezeit (selbsthärtend)	4:00 Min.
Abbindezeit (Lichthärtung)	20 Sek.

### Artikelinformationen

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
<b>Harvard LuteCem SE</b> 5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen Harvard Mini 4:1/10:1 S-Brown, 5 Mischkanülen Harvard Mini 4:1/10:1 O-Brown, 5 intra tips long Farbe Translucent Farbe A2	<b>Harvard Mini 4:1/10:1 S-Brown</b> Nachfüllbeutel mit 50 mixing tips
7081101 7081105	7093050
	<b>Harvard Mini 4:1/10:1 O-Brown</b> Nachfüllbeutel mit 50 mixing tips
	7091100
	<b>Harvard IntraTips long</b> Nachfüllbeutel mit 50 intra tips long
	7083620

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.  
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.  
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



# HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH  
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany  
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0  
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19  
info@harvard-dental-international.de