



HARVARD®

Harvard SuperSnap®

Vinyl Polysiloxan Abformmaterial

NEU

Schnell
wie das
Schnellste!



DE

Ein Abformmaterial der neuesten Generation ...

... das ist Harvard SuperSnap®. Dieses Produkt vereint alle Vorteile unserer bisherigen PremiumSil-Produkte mit neuen Abbindeigenschaften.

Sie möchten trotz langer Verarbeitungszeit eine kurzer Mundverweildauer

- Dadurch können Sie stressfrei arbeiten, Zeit einsparen und Sie erhöhen den Patientenkomfort.

Sie möchten je nach Umfang der Abformung zwei verschiedene Abbindetypen verwenden

- Verfügbar in 2 Snap-Set Varianten: **Regular Snap** und **Quick Snap**.

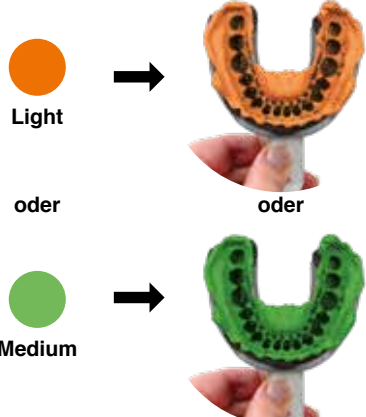
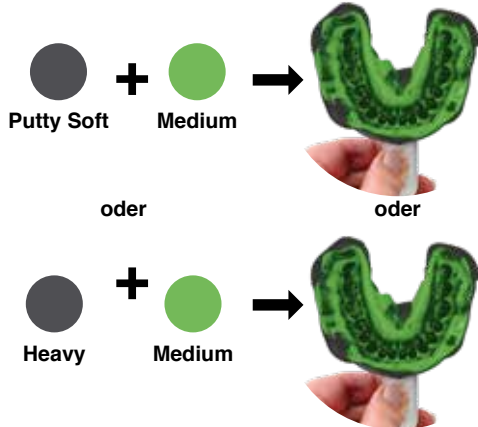
Sie möchten eine exakte Lesbarkeit

- SuperSnap® bietet neue kontrastreiche Farben für eine perfekte Lesbarkeit.

SuperSnap® Abformmaterial bietet Ihnen wie gewohnt:

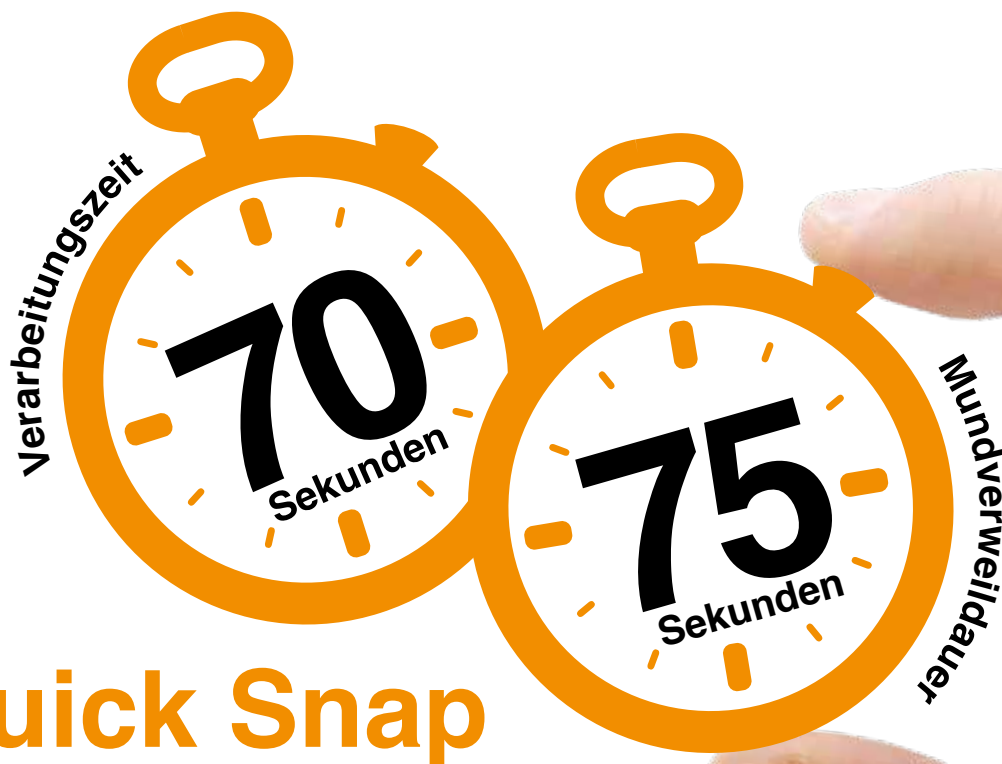
- Exzellente Fließeigenschaften
- Hohe elastische Rückstellung, Dimensionsstabil
- Exakte Zeichnungsschärfe
- Stark ausgeprägte Hydrophilie für beste Ergebnisse und sehr hohe Genauigkeit
- Wie gewohnt: Very Berry!
- Geeignet für die Sandwich- und Putty-Wash Technik
- Verschiedene Viskositäten verfügbar: Putty, Putty Soft, Heavy, Mono, Medium, Light
- Optimale knetbare Konsistenz beim Putty

Harvard SuperSnap® Materialkombinationen:

Technik	Phase 1	Phase 2
2 Schritte / 2 Phasen Putty-Wash-Technik (Materialanwendung nacheinander)		
1 Schritt / 2 Phasen Sandwich Technik (Materialanwendung gleichzeitig)		
1 Schritt / 1 Phase Monophasentechnik		

Zahlen, die für sich sprechen!

Produkt	Verarbeitungszeit 23°C (Min:Sek.)		Mundverweildauer (Min:Sek.)	
	Quick Snap	Regular Snap	Quick Snap	Regular Snap
Harvard SuperSnap® Light	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Medium	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Mono	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Heavy	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Heavy MaxiMix	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Soft MaxiMix	-	1:45	-	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Handmix	1:10	1:45	1:15	1:45
Harvard SuperSnap® Putty Soft Handmix	1:10	1:45	1:15	1:45
	Fast Set	Normal Set	Fast Set	Normal Set
Harvard PremiumSil (Light, Medium, Mono, Heavy)	1:10	1:45	1:30	2:30
Harvard PremiumSil (Putty, Putty Soft)	1:00	1:20	1:45	2:30
Harvard PremiumSil (Putty Soft MaxiMix)	-	1:20	-	2:30
	Super Quick	Regular Set	Super Quick	Regular Set
3M Imprint 4 Ultra Light	1:15	-	1:15	-
3M Imprint 4 Light	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Regular	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Penta Heavy	1:15	2:00	1:15	2:00
3M Imprint 4 Penta Putty	-	1:30	-	2:30



Quick Snap

Bestellinformationen

Harvard SuperSnap®

Regular Snap

2 Automix-Kartuschen à 50 ml, 12 Mischkanülen 1:1 4 IntraTips yellow
Light orange 7083801
Medium grün 7083811

2 Automix-Kartuschen à 50 ml, 12 Mischkanülen 1:1
Mono blau 7083821
Heavy schwarz-grau 7083831

2 Dosen à 600 g, 2 Löffel
Putty schwarz 7083841
Putty Soft schwarz 7083851

MaxiMix-Kartusche, 380 ml, 10 dynamic mixers, 1 Bajonettring
Putty Soft schwarz 7083853
Heavy schwarz 7083833

Quick Snap

2 Automix-Kartuschen à 50 ml, 12 Mischkanülen 1:1, 4 IntraTips yellow
Light orange 7083802
Medium grün 7083812

2 Automix-Kartuschen à 50 ml, 12 Mischkanülen 1:1
Mono blau 7083822
Heavy schwarz-grau 7083832

2 Dosen à 600 g, 2 Löffel
Putty schwarz 7083842
Putty Soft schwarz 7083852

Mixing Tips und Zubehör

Harvard Auto-T 1:1 O-Yellow 7098000
 Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen für
 Light, Medium – Regular / Quick

Harvard Auto-T 1:1 O-Green 7098010
 Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen für
 Heavy – Regular / Quick

Harvard Auto-T 1:1 O-Pink 7098020
 Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen für
 Mono – Regular / Quick

Harvard IntraTips yellow 7083619
 Nachfüllbeutel mit 50 intra tips für
 Light, Medium – Regular / Quick

Harvard Maxi 5:1 Dynamic 7091400
 Nachfüllbeutel mit 50 dynamic mixers und
 2 Bajonettringen für Putty Soft MaxiMix
 Heavy – Regular MaxiMix

Harvard Dispenser Automix 1:1 7095100

Harvard TraySive 7083753
 10 ml Flasche



1892
 seit
HARVARD®

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.
 Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.
 Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
 Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
 Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
 Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
 info@harvard-dental-international.de