



Harvard TEMP Cem

Eugenolfreier temporärer Befestigungszement für Provisorien, Kronen und Brücken

- **Geringe Flimdicke**
Perfekte Passung der Restauration ohne Bisserrhöhung
- **Zementüberschüsse einfach entfernbar**
Angenehm und zeitsparend in der Anwendung
- **Optimale Haftung bei leichter Entfernbarkeit**
Sichere provisorische Versorgung der Stümpfe
- **Zement haftet vollständig im Provisorium**
Keine Rückstände auf dem Stumpf nach dem Entfernen des Provisoriums
- **Eugenolfrei**
Keine Störung von nachfolgenden Bondingschritten
- **Enthält Zinkoxid, bekannt für einen antibakteriellen Effekt**



Erhältlich in

- **5 ml oder 10 ml Minimix-Spritze:**
 - schnell und automatisch anmischbar
 - keine Misch- und Dosierfehler
 - sofort gebrauchsfertig
 - hygienisch
- **10 ml EasyDose® Spritze:**
 - ökonomisches Mischen
 - richtige Dosierung
 - attraktives Preis / Leistungsverhältnis



Praktische Anwendung

Harvard TEMP Cem ist ein eugenolfreier temporärer Befestigungszement auf Zinkoxidbasis. Die bequeme Darreichung in der Minimix-Spritze spart Zeit und sichert eine exakte Dosierung. Durch seine geringe Filmdicke ermöglicht das Material eine perfekte Passgenauigkeit der Restauration. Überschüsse am Kronenrand lassen sich einfach entfernen. Eine sichere Fixierung der Restauration ist genauso gegeben wie eine leichte Entfernbarkeit. Beim Herausnehmen des Provisoriums verbleibt der Zement nicht am Stumpf, sondern im Provisorium.

Kein umständliches Versäubern. Das spart Zeit und Nerven – von Arzt und Patient.




- 1: Ausgangssituation defekte Krone 11
- 2: Stumpfpräparation
- 3: Befüllen des Provisoriums mit Harvard TEMP Cem. Durch die Minimix-Spritze erfolgt eine exakte Dosierung und blasenfreier Zement. Nach einer Verarbeitungszeit von 1:30 Min. beginnt das Material abzubinden.
- 4: Nach der Aushärtungszeit kann der Überschuss problemlos entfernt werden.
- 5: Fertiges Provisorium (mit Harvard TEMP C&B, Harvard PremiumFlow und Harvard TEMP Glaze LC)
- 6: Bis zum Einsatz der definitiven Krone hat sich das Provisorium weder gelockert noch verfärbt. Die Entfernung erfolgt problemlos. Harvard TEMP Cem verbleibt rückstandslos in der provisorischen Krone, so dass auf eine aufwendige Stumpfreinigung verzichtet werden kann. Die darauffolgende Anpassung und das Einsetzen der definitiven Versorgung kann somit zeitsparend durchgeführt werden.

„Temporäre Versorgung: Der einfache und schnelle Weg zu einem ästhetischen Provisorium mit System.“

ZÄ Theresa Krause (Poliklinik für zahnärztliche Prothetik) / Direktor Prof. Dr. Heydecke
(Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf) - Martinistraße 52 · 20246 Hamburg

Harvard TEMP Cem im Vergleich

Sichere Haftung des Provisoriums + keine Materialrückstände am Stumpf = gesparte Zeit

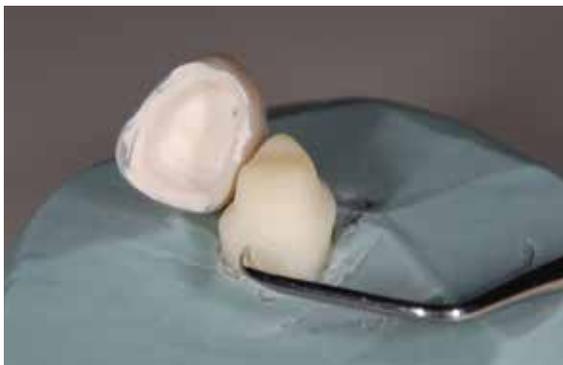

Harvard TEMP Cem:
Der Zement verbleibt komplett im Provisorium



weit verbreitetes Wettbewerbsprodukt:
Material verbleibt auch am Stumpf



Harvard TEMP Cem:
Die beste
Kombination von
Haftung und
rückstandsloser
Entfernbarkeit!



5 ml Minimix-Spritze



10 ml Minimix-Spritze



10 ml EasyDose® Spritze





10 ml

Technische Daten

Druckfestigkeit	10 MPa
Filmdicke	7 µm
Mischungsverhältnis (Basis/Katalysator)	1 : 1
Verarbeitungszeit bei 23 °C	1:30 Min.
Abbindezeit	2:00 bis 3:00 Min.

Artikelinformationen

	Bestell-Nr.
Harvard TEMP Cem	
5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen	7081100
10 ml Minimix-Spritze, 20 Mischkanülen	7081200
Harvard Mini 1:1 S-Brown	7091050
Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen	
Harvard TEMP Cem EasyDose®	7081103
10 ml EasyDose® Spritze	
Empfohlen als provisorisches Kronen- und Brückenmaterial und Glanzlack:	
Harvard TEMP Glaze LC	7081730
30 ml Flasche	
Harvard TEMP C&B 50 ml Automix-Kartusche ratio 10:1,	
10 Mischkanülen	
Farbe A1	7081651
Farbe A2	7081652
Farbe A3	7081653
Farbe A3.5	7081654
Farbe Bleach	7081650
Harvard Auto 4:1 / 10:1 S-Blue	7094000
Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen	
Harvard Dispenser Automix 4:1 / 10:1	7095000

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International

Harvard Vertriebspartner.

 **HARVARD®**

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de