




Harvard TransMatrix

Transparentes Matrix- und Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon

Harvard TransMatrix erlaubt eine transparente Abformung der Zahnoberfläche und der benachbarten Zähne vor der Präparation. Diese Abformung bildet dann eine maßgeschneiderte transparente Matrix für die anschließende Restauration (z. B. Veneers) mit lichthärtenden Composites.

- Hochtransparent, um eine perfekte Lichthärtung des Composites durch die Matrix zu ermöglichen
- Gute Endhärte und Detailreproduktion
- Belässt die Originalzahnform unverändert
- Dimensionsstabil bei Lagerung und auch nach Desinfektion
- Perfekte Konsistenz und Thixotropie
- **Schnelle Erhärtungszeit** (1:20 Min. im Mund)
- Angenehm für den Patienten mit neutralem Geruch und Geschmack
- **Zeitsparend** durch direkte Applikation im Mund
- Auch verwendbar als transparentes Bissregistrat

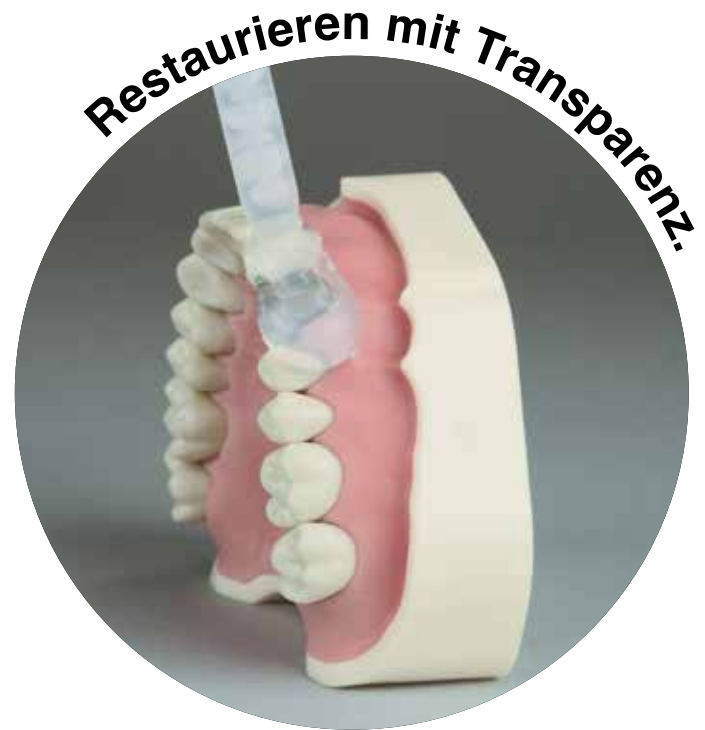

In 12 Schritten zum Erfolg.



1 Ausgangssituation



2 Applikation von Harvard TransMatrix auf die zu präparierende Fläche und Nachbarzähne



3 Schnelle Erhärtungszeit (1:20 Min. intraoral)



4 Vollständige Matrix



5 Präparation mit Schmelzanschrägung



6 Ätzen der präparierten Fläche mit Harvard Etch



7 Auftragen eines Adhäsivsystems, z. B. Harvard InterLock ONE



8 Applikation eines leicht erwärmten stopfbaren Composites in die Matrix, z. B. Harvard UltraFill



9 Korrekte Reponierung der befüllten Matrix in die Mundhöhle



10 40 Sek. Lichthärtung durch die Matrix. Vorgang nach Entfernen der Matrix wiederholen



11 Überschussentfernung und Politur mit geeigneten rotierenden Instrumenten und ggf. Finierstreifen



12 Fertige direkte Composite-Restauration

Technische Daten

Shore A Härte (nach 24 Studen)

64

Artikelinformationen

Harvard TransMatrix
2 x 50 ml Automix-Kartusche,
in der Farbe Transparent, 12 Mischkanülen

Bestell-Nr.

7083798

Harvard Auto 1:1 O-Green
Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7096000

Harvard Dispenser Automix 1:1

7095100

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de