

Harvard Cem OptiCaps®

Zinkfosfatcement

SE

Bruksanvisning för tandläkaren**Sammansättning**

Pulvret innehåller: zinkoxid, magnesiumoxid, pigment

Vätskan innehåller: fosforsyra.

**Användningsområden**

Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement är mycket lämpligt för cementering av kronor, bryggor, inlays, onlays och ortodontiband.

Kapslarna aktiveras snabbt och enkelt, och trycks lätt ut med en tång.

Blandning sker i kapseln (blandningstid 10 sekunder) med en högfrekvensblandare med ca. 4300 svängningar/min. Materialet kan appliceras direkt från kapseln.

Aktivering och blandning av Harvard Cem OptiCaps® (se vägledning på baksidan)

Aktivering och blandning av kapseln utförs i enlighet med vägledningen.

Användning

Applicera den bruksfärdiga blandningen på vidhäftningsytorna hos den förberedda rekonstruktionen direkt från kapseln.

Sätt omedelbart rekonstruktionen på plats (**bearbetningstid ca. 3 minuter** från blandningsstart vid 23 °C).

Nettohärddningstid för Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement är **maximalt 8 minuter**.

Särskilda upplysningar

- Den blandade cementen ska aldrig appliceras direkt på dentin nära pulpan eller på en öppnad pulpa.
- Efter cementeringen kan det uppkomma irritationer på pulpan.
- Cementen måste appliceras på den torra tandytan. Cementen får inte komma i kontakt med någon form av fukt under härdningen.
- Vätskan innehåller fosforsyra och är frätande. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikliga mängder vatten.

Enbart för professionell användning!**Användbar volym blandad cement per kapsel**

0,13 till 0,14 ml.

Förpackningsstorlekar


Kapslarna finns i lådor med 10 eller 50 styck.

Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement

- Får inte användas efter utgångsdatum.
- Lagringstemperatur: 2 – 28 °C.
- Motsvarar standard DIN EN ISO 9917.

	Harvard Dental International GmbH Margaretenstr. 2 – 4 15366 Hoppegarten, Tyskland	 0482	Tel: +49 (0) 30/99 28 978-0 Fax: +49 (0) 30/99 28 978-19	
		Made in Germany	info@harvard-dental-international.de www.harvard-dental-international.de	

**Vägledning för aktivering och blandning av
Harvard Cem OptiCaps® zinkfosfatcement**

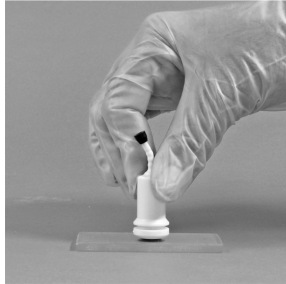


Skaka kapseln föra användning, så att pulvret lossnar.
Placera kapseln på ett jämnt underlag och tryck in kolven i kapseln
så långt det går.




Sätt i kapseln i tången och tryck **en gång** med spaken för att aktivera
kapseln.



Sätt omedelbart in kapseln i en vanlig blandare,
stäng locket och blanda i 10 sekunder
(ca. 4300 svängningar/min).

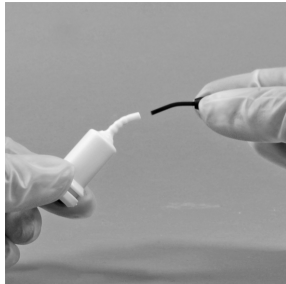

Efter blandningen **måste stiftet tas bort ur munstycket. Annars
finns risk för att kapseln spricker.**

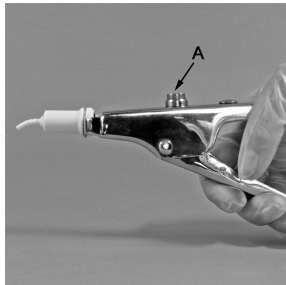

Sätt kapseln i tången och tryck två gånger med spaken för att
förbereda kapseln (ett tydligt klickljud hörs två gånger).
Applicera det blandade materialet direkt i preparationen.
Lossa appliceringsenheten (tryck på A-knappen) och ta av kapseln.

Våra försäljningsrepresentanter ger gärna råd
vid val av en lämplig högfrekvensblandare.