

Bruksanvisning till tandläkaren**Sammansättning:**

1 g pulver innehåller:
zinkoxid 860 mg, magnesiumoxid 86 mg;
1 g vätska innehåller:
o-fosforsyra 560 mg.

**Användningsområden:**

Fixering av kronor, bryggor och inlägg, ortodontiska arbeten, underfyllningar, provisoriska fyllningar.

Dosering:

Fixeringskonsistens:

1,5 g pulver : 1,0 g vätska

Underfyllningskonsistens:

2,1 g pulver : 1,0 g vätska

Dosering och provklimat för provändamål enligt DIN EN ISO 9917: Blanda till de angivna mängderna vid $23 \pm 1^\circ\text{C}$ och en relativ luftfuktighet på $50 \pm 10\%$.

Rekommendationer för bearbetning:

För tillblandning av cementen rekommenderas en till 20°C tempererad, ren och torr glasplatta och en spatel som inte färgar av sig.

Tillblandning:

För att kunna blanda till en homogen konsistens ska den doserade pulvermängden i fyra småportioner ($1/2$ $1/4$ $1/8$ $1/8$). Börja med den minsta mängden och blanda inom 90 sekunder ut den i den doserade vätskan. Fyllningskonsistensen har uppnåtts när den utdragna spetsen, som bildas då spateln lyfts upp, formar sig till liten krok och inte sjunker ner i massan igen. Fixeringskonsistensen har uppnåtts när den utdragna spetsen, som bildas då spateln lyfts upp, långsamt sjunker tillbaka ner i massan. Pulverrester och förorenade vätskor ska kasseras.

Blandningstid:

90 sekunder

Bearbetningstid från blandningsstart (vid 23°C):

För fixering: 3 minuter

För underfyllningar: 2 minuter

Härdningstid frå och med när tillblandningen är klar:

5 00 – 8 00 minuter

Särskilda upplysningar:

- Direkt applicering på dentin nära pulpan eller på öppen pulpa får inte göras.
- Irritation på pulpan kan uppstå efter cementering och vid användning som underfyllning.
- Cementen ska appliceras på den torra tandytan. Låt den torka utan fuktighet tillkommer.
- Se till att genast efter varje användning stänga behållarna igen.
- Vätskan innehåller fosforsyra och är frätande. Vid oavsiktlig ögonkontakt, spola genast ögat med mycket vatten.

Färger:

1 (vitaktigt), 2 (vitaktigt blått), 3 (vitaktigt gult), 4 (ljusgult),
5 (gult), 8 (pärlgrått), 12 (brunt), 15 (rosa)


Förpackningsstorlekar:

Pulver: 100 g och 35

Vätska: 40 ml och 15 ml

HARVARD CEMENT normalhärdande

- Ska inte användas efter utgången av bäst föredatumet.
- Lagringstemperatur: $2-28^\circ\text{C}$.
- Motsvarar följande specifikation: DIN EN ISO 9917.

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Harvard Dental International GmbH Margaretenstr. 2 – 4 15366 Hoppegarten Tiskland |  0482 | Tel: +49 (0) 30/99 28 978-0 Fax: +49 (0) 30/99 28 978-19 info@harvard-dental-international.de www.harvard-dental-international.de | V05 10/2010 10010 |
| | Made in Germany | | |

