




HARVARD®

Harvard **MultiChrome**

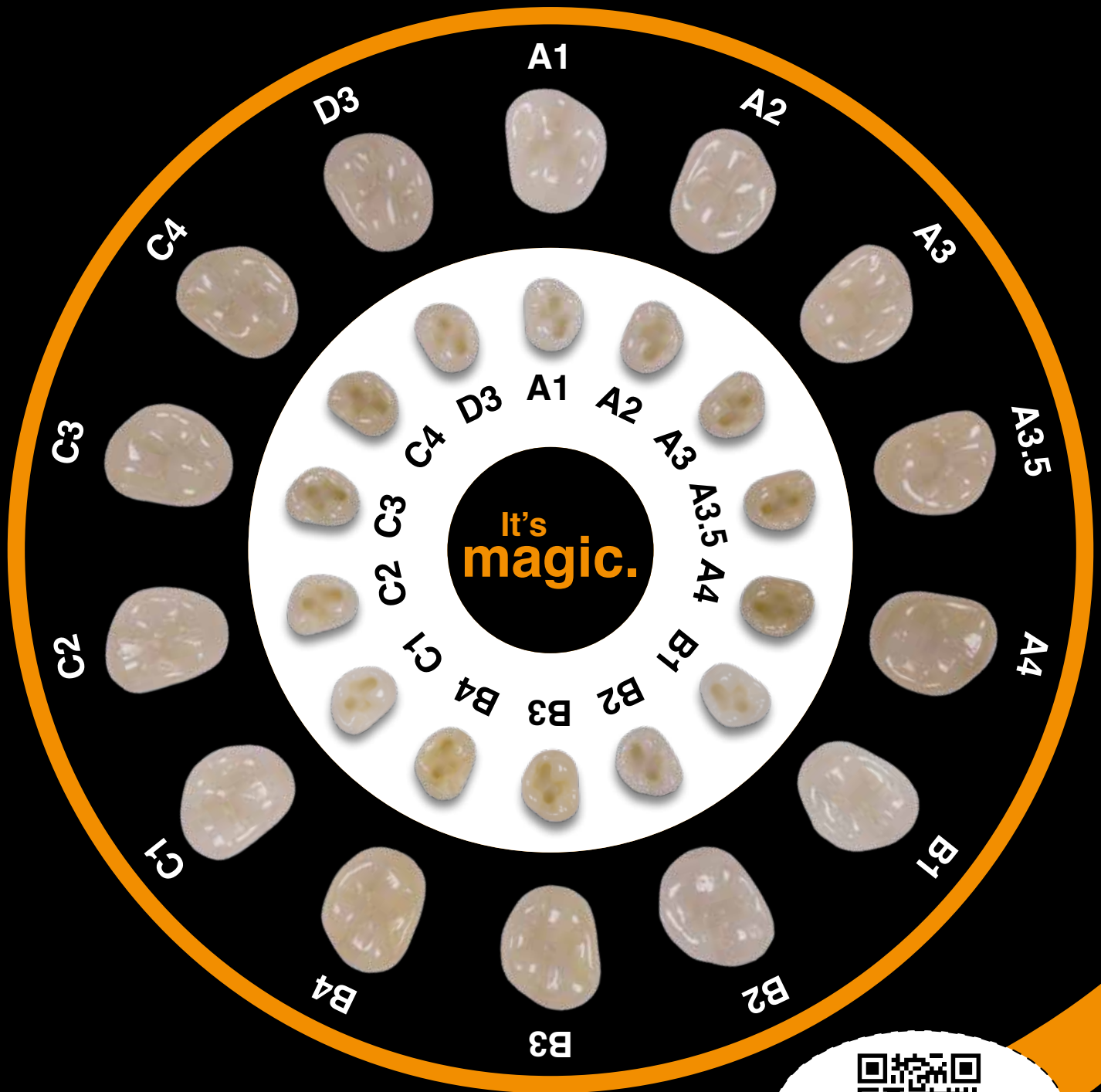

Made in Germany

DE

Harvard **MultiChrome** **It's magic.**

**Das farblich adaptive
Composite für fast alle
Zahnfarben.**

- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt für die Wiedergabe der Farbe der natürlichen Zahnschmelz
- Einfache Bevorratungslogistik



Das Composite

Unglaublich anpassungsfähig!

Ein Composite – Eine Farbe. Modellierbar oder als Flow.



Harvard MultiChrome ist ein High-Tech Composite mit aktiver Farbanpassung. Dank Hypernano-Technologie ist bei **Harvard MultiChrome** keine Farbbestimmung erforderlich. Für den Anwender ist es ein gutes Gefühl zu wissen, immer das passende Farbergebnis zu erhalten.

Harvard MultiChrome nimmt das Farbspektrum des zu behandelnden Zahnes stufenlos auf und gibt es durch seine spezielle lichtoptische Wirkung zurück.

Kaviät – vorher



A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

Restauration – nachher




EXPERTEN- MEINUNG



Amir Ibrik
D.D.S., N.D.B., E.R.B., MSc


>> Wirklich großartig! <<

>> Als Praktiker, der eine Composite-Füllung legt, brauche ich ein Material, das eine schöne Handhabung hat und eine sehr geschmeidige Konsistenz, es soll nicht klebrig am Instrument sein, eine gute Adaption an die Kavitätenwände haben und thixotrop sein, also da bleiben, wo ich es haben will. Und es soll leicht zu polieren sein. All diese Eigenschaften finde ich in Harvard MultiChrome. Und noch dazu das große Plus: mit einer Spritze kann ich fast alle Zahnfarben perfekt treffen. Wirklich großartig. <<

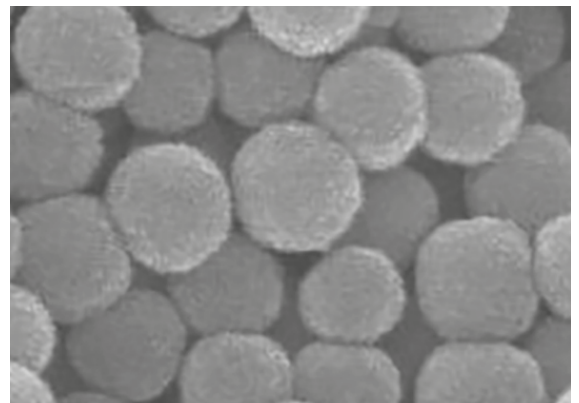


der nächsten Generation.




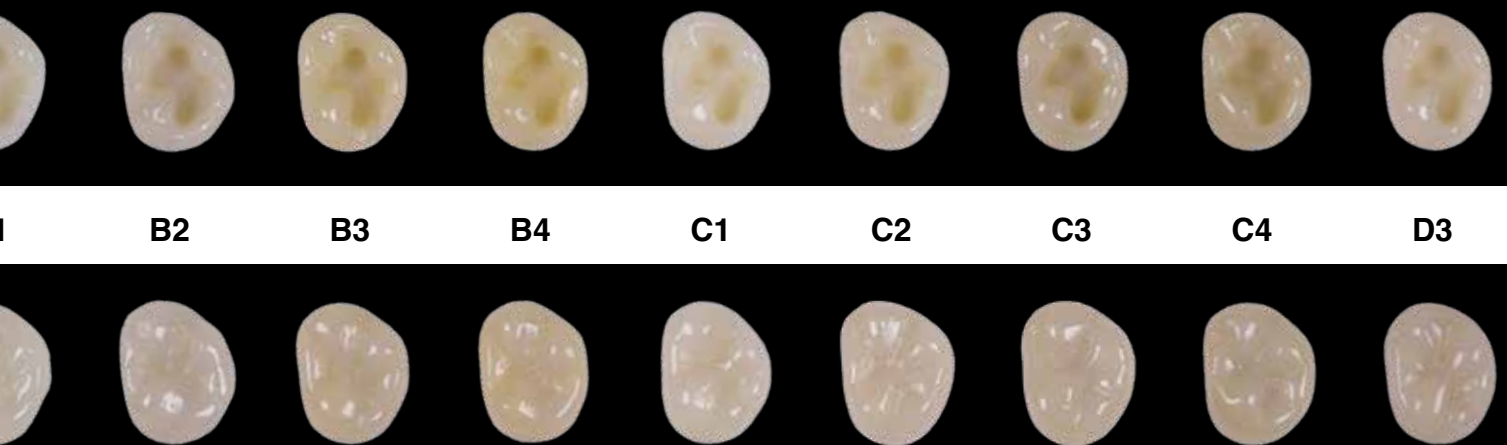


Physikalische Eigenschaften

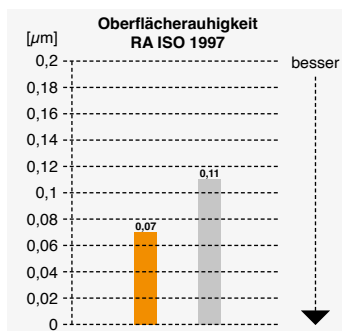


■ Harvard MultiChrome
■ Tokuyama Omnichroma

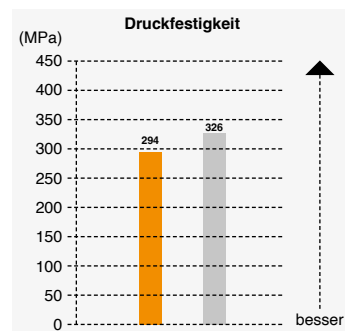

■ Harvard MultiChrome
■ Tokuyama Omnichroma

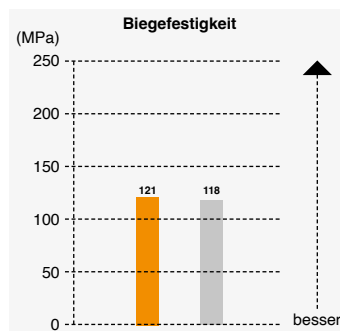

■ Harvard MultiChrome
■ Tokuyama Omnichroma

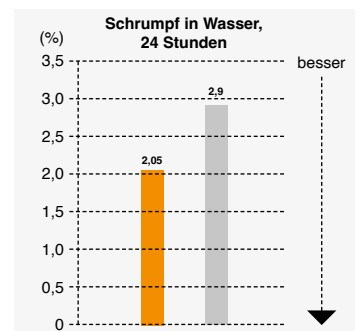

■ Harvard MultiChrome
■ Tokuyama Omnichroma




Harvard MultiChrome

Das farblich adaptive Composite.

Das innovative High Tech Composite **Harvard MultiChrome** nimmt das Farbspektrum des zu behandelnden Zahnes stufenlos auf und passt es dank seiner besonderen Hypernano-Technologie der vorhandenen Zahnschubstanzfarbe an. Das Geheimnis liegt in der Zusammensetzung, der Form und der Verteilung der Füllstoffe im Material.

Die wunderbar angenehme Konsistenz, die exzellente Polierbarkeit und der dauerhafte Hochglanz ergänzen die exzellenten physikalischen Eigenschaften von **Harvard MultiChrome**.

Harvard MultiChrome mit runden Hypernano-Füllern. Weißes Licht wird gebrochen und kavitätenfarbig reflektiert.

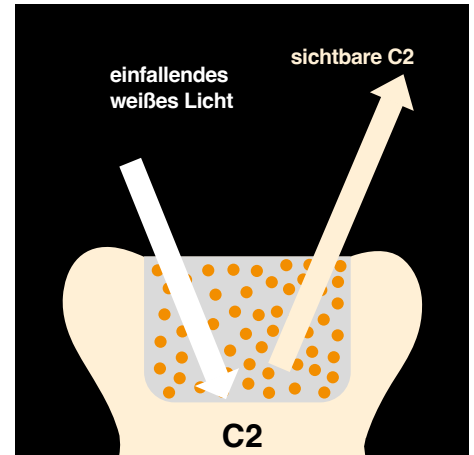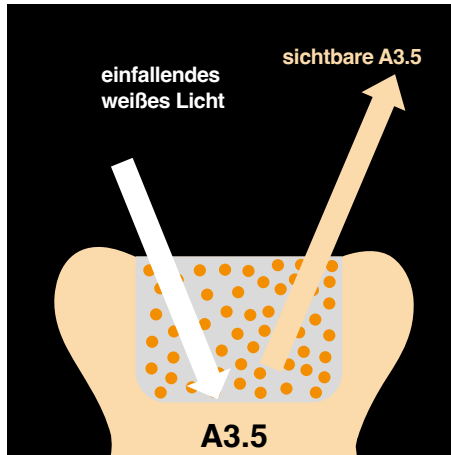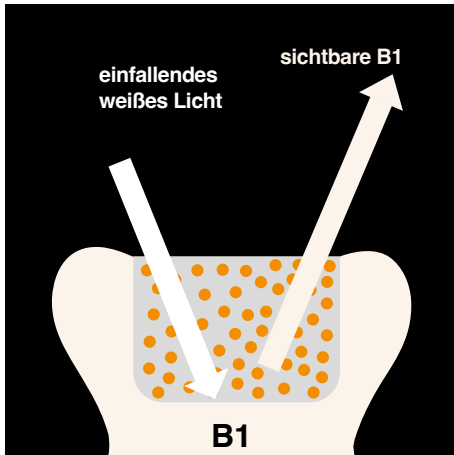

>> **A:** Der Patient kam, mit einer alten Compositrestauration von Zahn 13 bis Zahn 23, in die Praxis. Zu sehen sind alte, stumpfe, nicht glänzende und verfärbte Compositfüllungen. **B:** Das Bild zeigt scharfe, gebrochene Zahnhälse und dadurch bedingte Zahnfleischtaschen am Zahnhalsrand. **C:** Nach dem platzieren der Interdentalkeile und des Retraktionsfadens zum Verschieben der Gingiva, Entfernung der alten Compositfüllungen, Neupräparation und Entfernung der Karies, um optimale Platzverhältnisse zu schaffen. **D:** Auftragen von Harvard MultiChrome in den Interproximalbereich. **E:** Restauration vor der Politur. **F:** Restauration nach der Politur. **G:** MultiChrome Restauration. <<

der nächsten Generation.

- **Multi-Shade Restorative – farblich adaptives Composite**
- plus Composite zum Blocken und Maskieren

Harvard

MultiChrome

Multi-Shade Restorative

- Für Anwender, die sich ein einziges Composite für viele Farben wünschen
- Farblich stufenlos anpassungsfähig an fast alle Zahnfarben
- Unsichtbarer Übergang zwischen Schmelz, Dentin und Composite, Randschlüsse sind nicht zu sehen
- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt
- Hervorragende Handhabung
- Niedriger Schrumpf
- Dauerhafter Hochglanz nach der Politur
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Exzellente mechanische Eigenschaften
- Röntgenopak
- Opaleszent
- Einfache Bevorratungslogistik


Harvard Block 'n Mask

Composite zum Blocken und Maskieren

- Korrigiert die Farbanpassung in schwierigen Situationen und bei starken Verfärbungen (z. B. Durchscheinen der dunklen Mundhöhle; Abdecken von Verfärbungen)



Optimale, **stufenlose Farbanpassung an fast jede natürliche Zahnfarbe** nach der Lichtpolymerisation.

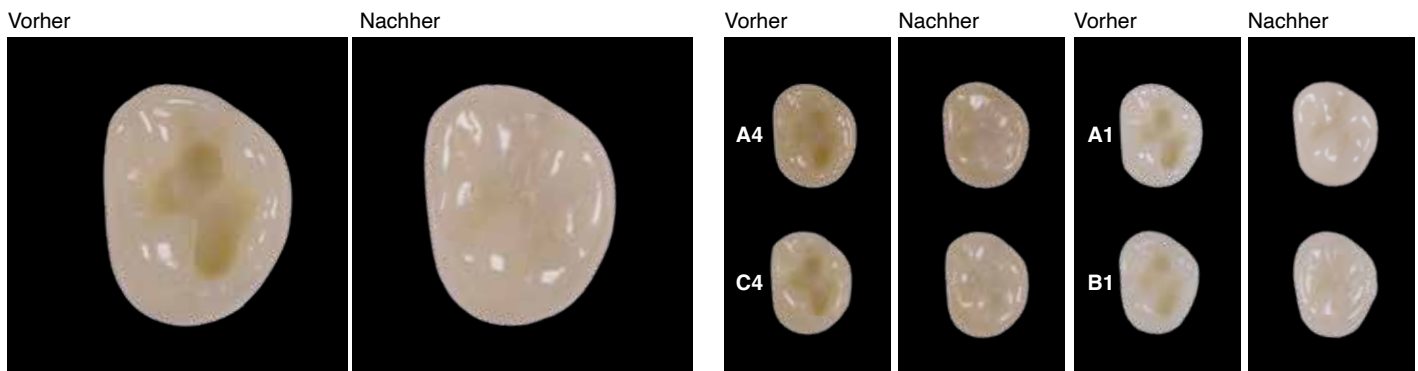

Seitenzahnpräparation A3

Restauriert mit
Harvard MultiChrome

Restauration verschiedener Zahnfarben mit **Harvard MultiChrome**

- **Multi-Shade Restorative** – farblich adaptives fließfähiges Composite
- plus flowable Composite zum Blocken und Maskieren

Harvard

MultiChrome Flow

Multi-Shade Flowable Restorative

- Für Anwender, die sich ein einziges fließfähiges Composite für viele Farben wünschen
- Farblich stufenlos anpassungsfähig an viele Zahnfarben
- Unsichtbarer Übergang zwischen Schmelz, Dentin und Composite, Randschlüsse sind nicht zu sehen
- Auch für die erweiterte Fissurenversiegelung
- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt
- Hervorragende Handhabung
- Optimale, fließfähige Konsistenz; thixotrop
- Niedriger Schrumpfung
- Dauerhafter Hochglanz nach der Politur
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Exzellente mechanische Eigenschaften
- Röntgenopak
- Opaleszent
- Einfache Bevorratungslogistik

Harvard Block 'n Mask Flow

Flowable Composite zum Blocken und Maskieren

- Korrigiert die Farbanpassung in schwierigen Situationen und bei starken Verfärbungen (z. B. Durchscheinen der dunklen Mundhöhle; Abdecken von Verfärbungen)



Optimale, **stufenlose Farbanpassung** für kleine Schmelz- Restaurationen.



vorher



nachher



Präparation für erweiterte
Fissurenversiegelung

Restauration mit
Harvard MultiChrome Flow

Harvard MultiChrome im Überblick:



	3 g Spritze	20 x 0.25 g OptiTips®
Harvard MultiChrome	7100001	7100002
Harvard Block 'n Mask	7100005	7100007

Kit	
Harvard MultiChrome Kit	
3 Spritzen à 3 g Harvard MultiChrome, 1 Spritze 3 g Harvard Block 'n Mask	7100009

Harvard Applier OptiTips®	7095200
---------------------------	---------

Harvard MultiChrome Flow	
2 x 1 ml Spritze, inkl. 8 Needle Tips H18	7100003
Harvard Block 'n Mask Flow	
2 x 1 ml Spritze, inkl. 8 Needle Tips H18	7100006

Harvard NeedleTips H18	7095158
Nachfüllbeutel mit 50 Needle Tips	

Harvard Vertriebspartner.

10382_DE_02/24



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de



www.harvard-dental.de