

Dosage

Harvard Cement prise rapide

- Pour scellements:
poudre 1,8 g : liquide 1,0 g

Harvard Cement prise normale

- Pour scellements:
poudre 1,5 g : liquide 1,0 g

- Pour fonds de cavité
poudre 2,1 g : liquide 1,0 g

**Consultez le mode
d'emploi s'il-vous-plaît !**



1. Doser la poudre et le liquide sur une plaque de verre propre et sèche.
Température de la plaque : environ 23 °C.



2. En vous aidant d'une spatule en acier inoxydable, diviser la poudre en 4 portions : 1/2, 1/4, 1/8, 1/8.



3. Mélanger le premier 1/8 de poudre avec le liquide à l'aide de la spatule.
Durée du mélange : 15 secondes.



4. Faire de même avec le second 1/8 de poudre, toujours dans une durée de 15 secondes.



5. Incorporer le 1/4 de poudre.



6. Mélanger en écrasant fortement avec la spatule.
Durée : 30 secondes.



7. Mélanger le dernier 1/2 de poudre.
Durée : 30 secondes.



8. Étaler sur toute la surface de la plaque.



9. Mélange prêt à l'emploi après 90 secondes.